

Movia Belt

Movia Belt placeras lågt runt höft/bäcken och ger trygga grepp vid förflyttning, uppresning och stöd.



Storlek S/M/L
i samma bälte.

Movia Belt är ett flexibelt vårdbälte för uppresning, gångstöd samt som benlyftband. Med enkel elastisk resårlösning samt grenband som förvaras i bältet gör att bältet får en bättre passform samtidigt som det minskar risken att bältet glider på höften vid uppresning och stöd vid gående.

En storlek - S/M/L

Fjädrande lösning i spänn- och dragmekanismen ger flexibel passform och förenklar val av storlek. Bältet finns också i en separat storlek för XS respektive XL.

Ergonomiska placerade handtag

De fyra handtagen ger vårdaren bra grepp vid sittande överflyttning, uppresning och stöd.

Grenband nära till hands

MoviaBelt är försedd med grenband som förvaras i bältet som snabbt kan tas fram och användas.

Tryggt stöd i vardagen

Bältet ger vårdaren säkra greppmöjligheter nära brukarens kropp och kan användas av en eller två vårdare beroende på brukarens behov och aktuell situation.

Uppresning

Stöd från sittande till stående, med grepp nära brukarens kropp.

Stå- och gåträning

Stöd vid kortare gångsträckor eller träning där extra trygghet behövs.

Sittande överflyttning

Stöd mellan exempelvis säng, rullstol, stol eller toalett.

Ben in/ur säng

Kan användas tillsammans med lyft för att hjälpa benen - ej personlyft.

Funktioner



- Elastiskt bältesband
- Ergonomiska/greppvänliga handtag
- Förberett för grenband
- Integrerad förvaringsficka baktill
- Olika material på insidan - olika behov
- Avtorkningsbar yta för snabb rengöring

Grenband nära till hands



Resår och grenband ger extra stabilitet och minskar risken att bältet glider på höften.

Integrerad nätficka håller grenbanden nära till hands - utan att de är i vägen.

Användning i vardagen



Trygga grepp vid uppresning och överflyttning.



Extra stöd vid gåträning.



Stöd vid ben i/ur säng/sårvård med lyft.

Viktigt

Movia Belt är inte avsett för personlyft eller kroppslift. Vid användning tillsammans med lyft avser funktionen endast stöd vid ben in eller ur säng, enligt bruksanvisning.

Hygieniskt och praktiskt

Bältet kan spritas av med vanligt förekommande alkoholbaserade ytdesinfektionsmedel inom vården.

Produktspecifikation MoviaBelt

Vårdbälte/stödbälte avsedd för: Sittande överflyttning, uppresning, stå- och gåträning samt stöd vid ben in/ur säng tillsammans med lyft. Ej personlyft.

Artikelnr: 2000-S/M/L - 2000-XS - 2000-XL

Material: Polyester

Artikelnr: 2001-S/M/L - 2001-XS - 2001-XL

Material: Polyester, PU



Tvättråd: Max 80 grader
Max brukarvikt 170 kg

