


Movia PocketSlide

Det nya positioneringssystemet för vårbädden.

Smart
integrerad i
vårbädden

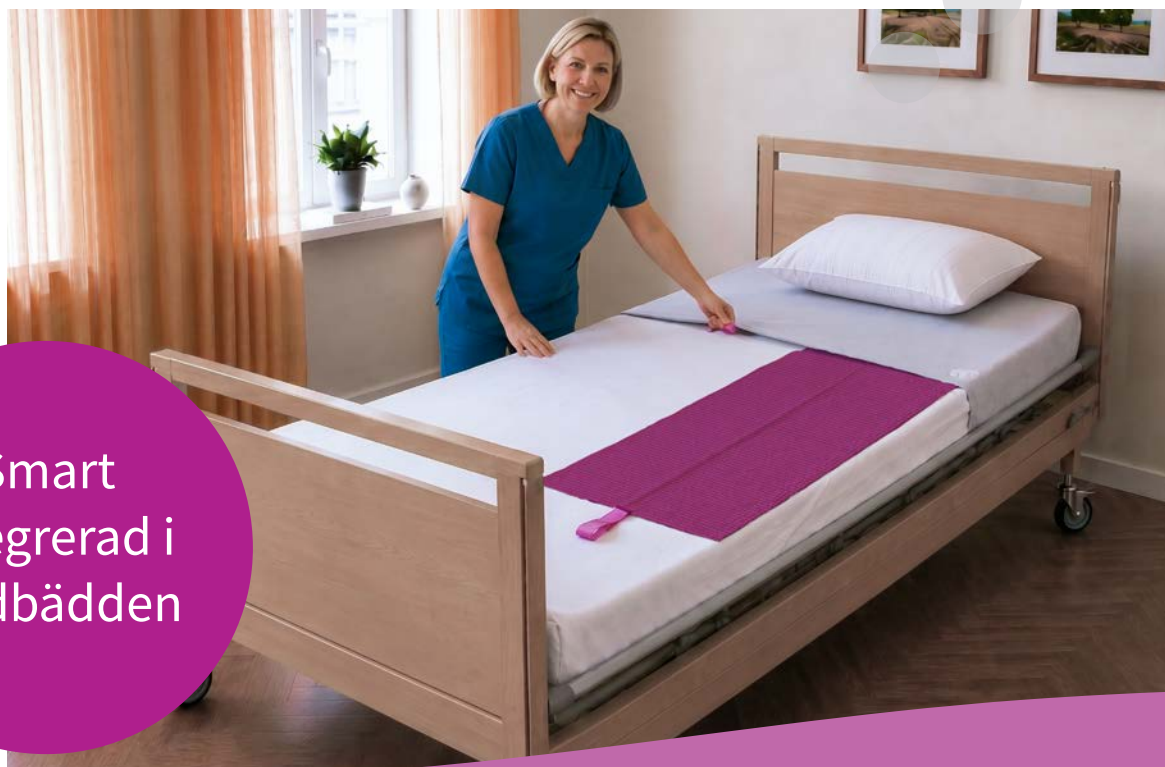

Kort om produkten

Movia PocketSlide är ett patentsökt hjälpmedel som gör positioneringar och förflyttningar i sängen mycket enklare.

PocketSlide erbjuder ett nytt sätt att tänka kring positioneringshjälpmedel i säng. Vi har utvecklat ett multifunktionellt hjälpmedel genom att kombinera de bästa egenskaperna med dagens permanenta och temporära till ETT hjälpmedel. I stället för att förvara glidmaterial separat och ofta långt från sängen inte-

greras det istället på madrassen där det ska användas. Överdrag "Pocket" med en tvådelade glidmattor "Slide". Det gör hjälpmedlet lätt att hitta, lätt att placera och använda samt lätt att lägga tillbaka efteråt. Med Movia PocketSlide innebär det en enklare vardag för både vårdare, brukaren och verksamhet.

Alltid nära till hands - redo när behovet uppstår

Sliderna förvaras direkt i överdraget.

Glid och friktion på rätt plats


Minskar ofrivilligt glid och reducerar antalet repositioneringar.

Vanliga arbetsmoment blir enklare

Positionering, appliceringar, aktiveringar.

Patentsökt lösning

En ny och genomtänkt produktidé.

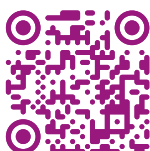

Intresserad av mer info?
Ta kontakt med oss via QRkoden.

MoviaCare
info@moviacare.se | www.moviacare.se

Varför PocketSlide?

Grundidén är enkel: hjälpmedel ska finnas där de används. Då ökar chansen att de verkligen används när behovet uppstår.

Utmaningen i vardagen

- Olika glidmaterial förvaras ofta långt ifrån sängen.
- Brukare som ofta glidit ner i säng.
- Att hjälpmedel inte bäddas in rätt, används fel eller inte alls.
- För många olika varianter och storlekar av glidmaterial.
- Utbilda och upprätthålla hjälpmedelskunskap kring alla friktionsreducerande hjälpmedel.
- Flera olika lager hjälpmedel som ska tvättas.

Den integrerade sliden är slitsad i två halvor (45x150cm) för enkel applicering och användning. Den kan användas enkel eller dubbel beroende på behov.



Så löser Movia PocketSlide detta

- Ett överdrag med tvådelade slide som är integrerat vid madrassens huvudända – finns alltid på plats när behov uppstår.
- Den tvådelade sliden gör det lätt att ta fram, placera, använda, ta bort och förvara.
- Sliden är lätt att byta ut vid tvätt eller rengöring.

Längden och måtten är avpassad till att ge maximalt glid där det verkligen behövs – under skuldror, höft, lår.



Intresserad av mer info?
Ta kontakt med oss via QRkoden.

Funktioner och användningsområden

Movia PocketSlide är utvecklad för att underlätta flera vanliga arbetsmoment i och kring säng.

Vanliga användningsområden

- Vändning i säng
- Högre upp i säng
- Repositionering
- Aktivering i säng
- Mobilisering
- Selapplicering
- På och avklädning

Dessutom...

När sängryggen höjs kan detta bidra till att brukaren lättare följer med uppåt i sängen i stället för att glida nedåt. Det kan ge bättre stöd för hållning, komfort och andning.

Detta är ett tydligt mervärde som gör Movia PocketSlide till mer än en lösning för enbart vändning och förflyttning.



Sammanfattade fördelar

Alltid nära till hands • snabb att ta fram • enkel att återställa
flexibel användning • utbytbar slide • smart förvaring direkt i sängen.

Produktfakta, material och skötsel

Produktutföranden

Movia PocketSlide 90:	för sängbredd 90 cm
Movia PocketSlide 105:	för sängbredd 105 cm
Safe Working Load:	200 kg
Slide:	45 x 150 cm (dubbla slider) med spänne

Material

Överdrag:	Polycotton
Slide:	Antistatisk polyester eller polyamid
Rengöring:	Maskintvätt. Slider kan även torkas av med i vården förekommande alkoholer.

CE-märkt som en medicinteknisk produkt enligt MDR 2017/745, klass I.

Skötsel och materialmärkning



60-80°C

Överdrag/Slide
Tvätt 60-80°C
Använd inte sköljmedel



ALKO

Avtorkning
Vanligt förekommande alkoholer



PES

PES
Polyester



PES/CO

PES/CO
Polycotton

Artikelöversikt

Artikel	Produkt	Passar sängbredd	SWL
1400-90	Movia PocketSlide 90/Antistatisk Polyester	90 cm	200 kg
1401-90	Movia PocketSlide 90/Polyamid	90 cm	200 kg
1400-105	Movia PocketSlide 90/Antistatisk Polyester	105 cm	200 kg
1401-105	Movia PocketSlide 105/Polyamid	105 cm	200 kg

Movia PocketSlide – ett smart hjälpmedel för smidigare arbete i säng.

