

Movia SideTurn

Smart utformad vändkudde för enklare sidovändning, omvårdnad och förflyttning i säng



Smart design
för lättare
placering

Movia SideTurn är utvecklad för att göra vändning från ryggläge till sidoläge enklare, tryggare och mer skonsam. Den smarta utformningen gör att kudden lättare kan föras in under och mellan knäna lättare utan att benen behöver lyftas. Movia SideTurn kan också användas vid selapplicering för stela brukaren som inte kan sära på benen. stela brukare för att aktivera brukaren att skjuta ifrån med benen högre upp i säng.

Med Movia SideTurn blir repositionering i säng enklare att genomföra på ett ergonomiskt och kontrollerat sätt.

Produktens form hjälper vårdaren att arbeta mer skonsamt samtidigt som brukaren kan vändas varsamt och stabilt till sidoläge.

Lätt att placera

Den öppna formen gör att SideTurn kan föras in från sidan under och mellan knäna.

Stabilt stöd vid sidoläge

Hjälper till att positionera benen och ge ett stabilt läge vid vändning och omvårdnad.

Aktiverar brukarens egen kraft

Kan användas som mjukt mothåll när brukaren medverkar vid förflyttning högre upp i säng.

Funktioner och produktfakta



Lätt att applicera

SideTurn förs in från sidan under och mellan knäna. Den öppna, formstabila utformningen gör placeringen enklare och minskar behovet av att lyfta benen högt.



Stöd vid egen förflyttning högre upp i säng

SideTurn kan placeras mellan fötterna och sängens fotgavel som ett mjukt mothåll när brukaren medverkar med benen vid förflyttning högre upp i säng.



Användningsområden

Sidovändning, stabilt sidoläge, omvårdnad i säng, på-/avklädning, selapplicering och stöd vid förflyttning högre upp i säng.

Säkerhetsnotis

Ej avsedd att användas som pall, fristående fotstöd eller för lyft av brukare.

Produktspecifikation

Artikelnr: 1810

Produkt

Movia SideTurn – Wändkudde / positioneringskudde

SWL

170 kg

Mått

46 × 29 × 10 cm

Vikt

ca 1,0 kg

Kärna

Återvunnen Polyureol skum

Överdrag

Dartex – avtorkningsbart/desinficerbart med i vården vanlig förekommande alkoholbaserade ytdesinfektionsmedel. Ej klorin. Maskintvätt 60-80°C. Använd inte sköljmedel.

CE-märkt som en medicinteknisk produkt enligt MDR 2017/745, klass I.

